

# UBROUSKY K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ - PRO ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCI V JEDINÉM KROKU

## Sani-Cloth™ Active

Ubrousky na bázi KAS určené k čištění a dezinfekci zdravotnických prostředků a zdravotnických povrchů citlivých na alkohol

Sani-Cloth Active jsou vlhčené bezalkoholové ubrousky, které působí proti široké škále patogenů (bakteriím, TBC, kvasinkám, plísním a virům); tím jsou schopny zajistit dezinfekční účinnost v praxi, v reálných provozních podmínkách.

Testováním byla ověřena účinnost kapaliny, která se z ubrousků uvolňuje při otírání a dezinfekci ošetřovaného povrchu.

Sani-Cloth Active navíc nabízí:

- ▲ Čištění a dezinfekci v jediném snadném kroku
- ▲ Vynikající materiálovou kompatibilitu
- ▲ Kompatibilitu při aplikaci na povrch ultrazvukových sond
- ▲ Různá balení a dostatečnou velikost ubrousků, které jsou připraveny k okamžité aplikaci a to v několika různých baleních



# Sani-Cloth™ Active

Ubrousky na bázi KAS určené k čištění a dezinfekci zdravotnických prostředků a zdravotnických povrchů citlivých na alkohol

## Proč používat Sani-Cloth™ Active?

### ŠIROKÉ SPEKTRUM ÚČINNOSTI

Ubrousky Sani-Cloth™ Active jsou účinné proti široké škále mikroorganismů; působí proti bakteriím, TBC, kvasinkám, plísním, proti virům (včetně Norovirů), a to během krátké doby působení.

### ÚČINNOST ZAJIŠTĚNA UVOLŇOVANOU KAPALINOU

Ubrousky Sani-Cloth™ Active jsou vhodné pro použití v reálných provozních podmínkách. Jejich účinnost byla ověřena testováním neředěné kapaliny, která se z ubrousků uvolňuje při otírání povrchů.

### VYNIKAJÍCÍ MATERIÁLOVÁ KOMPATIBILITA

Ubrousky bez alkoholu, chlóru a kyseliny peroctové nabízejí zdravotnickým zařízením vynikající materiálovou kompatibilitu na většině povrchů včetně ultrazvukových sond.

### SPOLEHLIVÉ A PRAKTICKÉ

Dezinfekční ubrousky jsou připraveny k okamžitému použití, nevyžadují žádný čas na přípravu ani nároky spojené s dávkováním. Aplikace spojuje čištění a dezinfekci v jednom jediném snadném kroku, tím je zajištěno efektivní a spolehlivé využití produktu.



**Sani-Cloth™ Active**  
Dóza 125 ubrousků  
(130 x 220 mm)



**Sani-Cloth™ Active**  
Náhradní náplň 125  
ubrousků  
(130 x 220 mm)



**Sani-Cloth™ Active**  
Dóza 200 ubrousků  
(200 x 220 mm)



**Sani-Cloth™ Active**  
Kbelík 225 ubrousků  
(245 x 300 mm)

## VÝSLEDKY MIKROBIOLOGICKÝCH A VIROLOGICKÝCH TESTŮ

MIKROBIOLOGICKÁ ÚČINNOST NEŘEDĚNÉHO ROZTOKU	DOBA PŮSOBNÍ
Dezinfekce povrchů dle metodiky DGHM 2001 s mechanickým účinkem (baktericidní, fungicidní - účinnost proti kvasinkám) (čistě i nečisté podmínky)	5 min
EN 13727 baktericidní (čistě i nečisté podmínky)	1 min
EN 13624 fungicidní - účinnost proti kvasinkám (čistě i nečisté podmínky)	1 min
EN 13624 fungicidní (čistě i nečisté podmínky)	15 min
EN 14348 tuberkulocidní (čistě i nečisté podmínky)	15 min
Účinný proti obaleným virům (vč. HBV, HCV, HIV) dle doporučení RKI 01/2004	30 s
Norovirus (MNV) (čistě i nečisté podmínky)	1 min
Virucidní dle doporučení RKI 01/2004	30 min
EN 14476 virucidní (čistě podmínky)	30 min

CE 0086

**ECOLAB s.r.o.**  
Vocetářova 2449/5, Libeň  
180 00 Praha 8  
Česká republika  
+420 602 156 877  
www.ecolab.com

**ECOLAB HEADQUARTERS:**  
**ECOLAB EUROPE GMBH**  
Richtistrasse 7  
8304 Wallisellen  
Switzerland  
+41 (0) 44 877 2001  
www.ecolab.com

**PDI LTD.**  
Aber Road  
Flint CH6 5EX  
United Kingdom

# VIRUCIDNÍ SPOLEHLIVÝ EFEKTIVNÍ

## OBLAST POUŽITÍ

Sani-Cloth™ Active jsou ubrousky k okamžitému použití pro čištění a dezinfekci zdravotnických prostředků a zdravotnických povrchů včetně povrchů citlivých na alkohol.

## NÁVOD K POUŽITÍ

Povrch otřete ubrouskem. Otřený povrch dále nechte schnout a neoplachujte jej. Důležité je kompletní smočení celého dezinfikovaného povrchu. Použití čistících a dezinfekčních ubrousků nenahrazuje pravidelné čištění.

## SLOŽENÍ

100 g roztoku pro impregnaci ubrousků obsahuje následující účinné látky:

0,45 g didecyldimethyl-  
amoniumchloridu

## BALENÍ A OBJEDNÁVÁNÍ

PRODUKT	MNOŽSTVÍ KUSŮ V KARTONU	OBJEDNACÍ KÓD
<b>Sani-Cloth Active</b> dóza (130 x 220 mm)	6 x 125 ks	3051580
<b>Sani-Cloth Active</b> náhr. náplň (130 x 220 mm)	9 x 125 ks	3051600
<b>Sani-Cloth Active</b> dóza (200 x 220 mm)	6 x 200 ks	3051560
<b>Sani-Cloth Active</b> kbelík (245 x 300 mm)	225 ks	3074610

## SKLADOVÁNÍ

Výrobek skladujte v původním obalu na chladném a suchém místě při teplotách do 25 °C, mimo přímé sluneční světlo. Spotřebujte do dvou měsíců od data otevření

## BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Produkt není nebezpečnou látkou nebo směsí.

Před použitím si vždy přečtěte údaje na etiketě a připojené informace o přípravku.

Podrobné informace pro bezpečné nakládání s přípravkem viz bezpečnostní list.  
POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

2018 / 043 APPR. 2018.08.06.

**ECOLAB®**